

Il documento presente spiega il procedere del prelievo della mucosa orale con i bastoncini per la tipizzazione HLA e la determinazione del CMV.

1. Set per il test

Ricezione del set con i bastoncini da SBSC.

La composizione del set con i bastoncini è quanto segue (foto no. 1):

- Una busta di cartone con le istruzioni stampati dentro.
- 2 pacchetti di bastoncini (con 2 bastoncini per pacchetto)

2. Procedere

2.1. Preparazione

Applicare il codice a barre (da SBSC o SRTS) sulla busta di cartone, sul questionario medico e sulla dichiarazione di consenso. (vedi Foto no. 2)

2.2. Effettuazione

Lasciar fare il prelievo al donatore spiegandogli quanto segue:

1. Deglutire bene un paio di volte.
2. Inserire il bastoncino nella bocca senza toccare altri punti.
3. Strofinarlo contro la parete interna della guancia con forza per 15 secondi, girare l'estremità del bastoncino e strofinare nuovamente per 15 secondi.
4. Lasciare asciugare il bastoncino (in mano o in un contenitore) per 3 minuti senza toccare l'estremità.
5. Ripetere la procedura con gli altri tre bastoncini passandoli in altri punti delle due pareti interne delle guance.
6. Infilare con cura i bastoncini nella busta.

Dopo la procedura, chiudere la busta di cartone e inviarla raccomandata a SBSC con il questionario medico e la dichiarazione di consenso.



Foto no. 1



Foto no. 2