

Dieses Dokument beschreibt das Vorgehen der Mundschleimhaut-Probe mittels Buccal Swabs für die HLA-Typisierung und die CMV-Bestimmung.

1. Buccal Swab Set

Erhalt des Buccal Swab Sets durch SBSC.

Das Buccal Swab Set ist folgendermassen zusammengesetzt (s. Abb. 1):

- 1 Kartonumschlag mit gedruckter Anleitung auf der Innenseite
- 2 Pack Teststäbchen (à je 2 Stäbchen)

2. Ablauf

2.1. Vorbereitung

Barcodekleber (SBSC oder RBSD) auf Buccal Swab Set, auf medizinischen Fragebogen und auf Einverständniserklärung kleben (s. Abb. 2).

2.2. Durchführung

Spender den Test selber durchführen lassen und ihm dafür folgende Anweisungen geben:

1. Gut schlucken, damit neuer Speichel in den Mund kommt
2. Ein Stäbchen in den Mund führen, ohne dass es eine andere Stelle berührt
3. Mit Druck 15 Sekunden gegen die Wange reiben, Stäbchenkopf drehen, und erneut 15 Sekunden reiben
4. Anschliessend das Stäbchen ohne Berührung des Stäbchenkopfs 3 Minuten trocknen lassen (in der Hand oder in Behälter)
5. Den Vorgang mit den drei weiteren Stäbchen an anderen Stellen an beiden Wangeninnenseiten wiederholen
6. Die Stäbchen sorgfältig in den Kartonumschlag legen

Nach Beendigung des Vorgangs Kartonumschlag zukleben. Diesen zusammen mit dem ausgefüllten medizinischen Fragebogen und der unterschriebenen Einverständniserklärung per Einschreiben an SBSC senden.

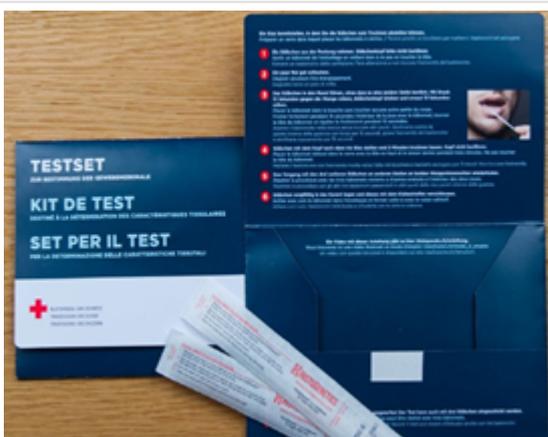


Abb. 1



Abb. 2